

■ INSERTO MAB PER ABLATORE

cod. MAB-ME-002



- inserto grazie al quale è possibile adattare le comuni punte da turbina commerciali ai vari ablatori ad ultrasuoni in commercio. Di seguito alcuni possibili impieghi dell'inserto MAB:
- a – nel grande rialzo, per realizzare l'antrostomia e lo scollamento della schneideriana;
 - b – nel mini rialzo, per discontinuare il pavimento del seno mascellare;
 - c – preparazione tunnel implantare in prossimità del nervo alveolare inferiore (utilizzare punta diamantata con testa arrotondata);
 - d – rifinitura delle cavità in Conservativa. Nelle cavità di terza classe, si consiglia di utilizzare una punta diamantata a palla divisa a metà in modo da evitare il contatto con il dente adiacente;
 - e – rifinitura delle preparazioni dei monconi in protesi fissa (stessa punta usata in preparazione, ma con grana più fine);
 - f – resezione dell'apice radicolare nell'apicectomia;
 - g – in Endodonzia per rimuovere le calcificazioni intracamerale e reperire gli imbrocchi dei canali radicolari;
 - h – realizzazione microgeografia e macrogeografia sulle superfici vestibolari per le quarte classi nei restauri in composito del settore frontale;
 - i – separazione creste sottili ossee (espansione orizzontale della cresta).



■ CHIAVE PER ADATTATORE ABLATORE

cod. MAB-03-001

