

■ INSERTO MAB PARA ABLATORE

cod. MAB-ME-002



inserto gracias al cuál es posible adaptar las comunes fresas de turbinas comerciales a las variedades de ablatore a ultrasonidos en comercio. De seguida algunos posibles empleos del inserto MAB:

- a - en el grande realzo, para realizar la antrostomia y el colocamiento de la schneideriana;
- b - en el mini realzo, para descontinuar el pavimento del seno maxilar;
- c - preparación túnel implantar en proximidad del nervio alveolar inferior (utilizar punta diamantada con cabeza redonda);
- d - refinamiento de la cavidad en Conservativa. En las cavidades de tercera clase, se aconseja de utilizar una punta diamantada a bola dividida a mitad en modo de evitar el contacto con el diente adyacente;
- e - refinamiento de las preparaciones de los munones en protesis fija (misma punta usada en preparación, pero con grana más fina);
- f - resección del ápex radicular en apicectomia;
- g - en endodoncia para remover las calcificaciones entrecamarales y hallar las embocaduras de los canales radiculares;
- h - realización microgeografía y macrogeografía sobre las superficies vestibulares para las cuartas clases en los restauros en compuesto del sector frontal;
- i - separación crestas sutiles oseas (expansión horizontal de la cresta).



■ LLAVE PARA ADATTATORE ABLATORE

cod. MAB-03-001

